

DEFİBRİLATÖR CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

1.0 CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- ✓ Akselendi Aile Sağlığı Merkezi Müdahale Odası

2.0 SORUMLULAR

- ✓ Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları

3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- ✓ Cihaz kullanımı esnasında hasta ile veya sedye yatak ile teması tam olarak izole edilmeli.
- ✓ Cihaz elektrodları doğru yerlere yerleştirilmelidir.

4.0 KULLANIMI

- ✓ Cihazın günlük temel kontrolleri yapılmalıdır.
 - Desarj kontrolü,
 - Batarya kontrolü,
 - Yazıcı kontrolü,
 - Ses kontrolü,
- ✓ Cihazın enerji düğmesi açılmadan önce aksesuarları kontrol edilmelidir.
 - Pedallar,kablolar,yazıcı kağıtları,elektrodlar kontrol edilmelidir.
- ✓ Elektrodlar uygun şekilde bağlanır.
- ✓ Aletin EKG monitörü ON/OFF düğmesine basılarak açılır.
- ✓ Defibrilatörün ON/OFF düğmesine basılarak açılır.
- ✓ Hastanın göğüs bölgesine kaşıkların geleceği bölgeye jel sürülmelidir.
- ✓ Uygulayacağınız enerji miktarı ayarlanır.
- ✓ Defibrilasyon için senkronizasyon kullanılması gerekiyorsa SYNC düğmesine basılır.
- ✓ Pedarlarda birindeki düğmeye basılarak aletin şarj olması sağlanır.
- ✓ Alet şarj olunca bip sesi gelecektir.
- ✓ Sol pedalı sternum sağına klavikula altına;sağ pedalı midaksiller hatta sağ interkostal aralığa yerleştirilir.
- ✓ EKG formuna bakınız eğer ritm VF veya cevapsız VT ise her iki düğmeye birlikte basılarak defibrile edilir.
- ✓ Kullanımdan sonra cihaz OFF durumuna alınır.

5.0 BAKIMI

- ✓ Cihaz mutlaka topraklı prizde çalıştırılmalıdır.
- ✓ Cihazın bataryası dolu ise elektrik bağlantısı çıkarılmalıdır.
- ✓ Batarya tam boşalınca şarz edilmelidir.
- ✓ Cihaz taşınırken OFF durumunda olmalıdır.
- ✓ Jel pedalları her kullanımdan sonra nemli bir bezle silinip kurulanmalı.

ASM Sorumlu Hekimi